



Jak poprawnie zdjąć jednorazowe rękawiczki

Pamiętajmy, że rękawiczki spełniają swoją rolę ochronną tylko jeżeli są poprawnie używane.


ZDJEMOWANIE RĘKAWICZEK KROK PO KROKU

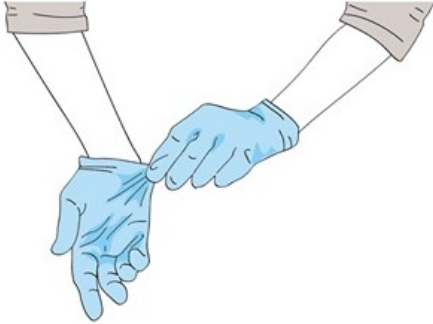

1. Pierwszą rękawiczkę należy chwycić (za pomocą drugiej ręki) pomiędzy nadgarstkiem a dłonią
2. Pociągnąć rękawiczkę od siebie tak, by wywinęła się na drugą stronę i objęła palce
3. Zdjąć rękawiczkę i pozostawiając ją w dłoni rozpocząć zdejmowanie drugiej

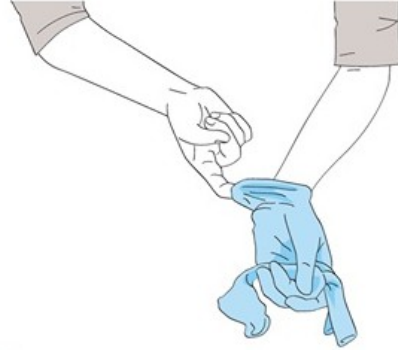

4. Aby zdjąć drugą rękawiczkę należy włożyć jeden palec między rękawiczkę a nadgarstek
5. Następnie pociągnąć rękawiczkę od siebie tak, by wywinęła się na drugą stronę i objęła palce i drugą (trzymaną w dłoni) rękawiczkę

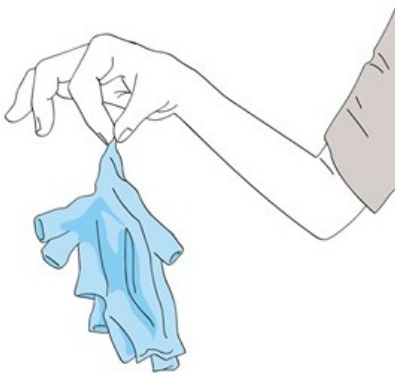

6. Rękawiczki należy wyrzucić do zamkniętego kosza



7. Następnie należy dokładnie umyć ręce